



ÚLCERA VENOSA

2 SEMANAS DE EVOLUCIÓN

Autor: María José García Gomis.
CAP Doctor Carles Ribas . Barcelona.

- Múltiples úlceras vasculares en cara anterior tibial izquierda
- Consulta tras 2 semanas de evolución por empeoramiento
- Pierna con edema, limitación del movimiento. Pulsos presentes

PERFIL PACIENTE:

- Hombre
- 85 años
- Hipertensión arterial
- Hiperplasia prostática benigna sin síntomas
- Artrosis de cadera no especificada
- Fractura de fémur
- Hernia inguinal
- Obesidad
- Bloqueo AV 1º grado

TRATAMIENTO

- En la primera consulta, se inicia tratamiento con curas cada 48h evaluando distintos apósitos y terapia compresiva de corta tracción sin una evolución favorable.
- Tras un mes y medio de evolución sin poder gestionar exudado y edema, se mantiene tratamiento con **UrgoClean Ag** y se inicia uso de compresión con **UrgoK2**.
- Tras 18 días con esta pauta, se observa control del edema notable, reducción del tamaño de las lesiones y del exudado y buena tolerancia por parte del paciente.
- Ante mejoría del lecho de la herida se cambia el tratamiento local a **UrgoStart plus Pad** y pomada de óxido de zinc en la piel perilesional.
- Tras 1 mes utilizando **UrgoK2** junto a **UrgoStart plus Pad** se disminuye la frecuencia de cambios a una vez por semana.

RESULTADO

La lesión está completamente cicatrizada en 3 meses y medio desde la aparición de la lesión, y tras 50 días de tratamiento con **UrgoK2** (tratamiento etiológico) y **UrgoClean Ag** y **UrgoStart plus Pad** (tratamiento local).



30/08/2023



DÍA 1: 02/10/2023



DÍA 18: 20/10/2023



DÍA 50: 21/11/2023

UrgoClean Ag UrgoK2 UrgoStart plus Pad UrgoK2 CIERRE DE LA LESIÓN

