



ÚLCERA VENOSA

Autor: José Luis Gea González.
Consultorio Auxiliar de Benejuzar.

- Úlcera vascular de repetición en zona supramaleolar interna de la pierna derecha
- Dolor y picor
- Alto exudado y mal olor
- Lecho rojizo y zonas cubiertas por tejido amarillo, bordes irregulares y piel circundante brillante y tensa

PERFIL PACIENTE:



HEALICO

- Mujer
- 91 años
- Barthel de 50
- HTA, IVC
- Espondiloartrosis
- Úlceras de repetición en pierna derecha



DÍA 1:
03/04/2023

UrgoCleanAg UrgoK2



DÍA 15:
17/04/2023

UrgoStart Contact UrgoK2



DÍA 21:
24/04/2023

UrgoStart Contact UrgoK2



DÍA 32:
05/05/2023

Corpitol UrgoK2

TRATAMIENTO

- Al presentar signos de infección, se realiza limpieza de la herida con suero fisiológico, fomento con una solución de polihexa-biguanda + antibioticoterapia, combinado con la aplicación de **UrgoClean Ag** y terapia compresiva multicomponente **UrgoK2**, previa hidratación de la extremidad.
- Tras 2 semanas, se revalúan los signos de infección y se observa una reducción del exudado y desaparición del tejido amarillento (detritus) por lo que se cambia la pauta de cura con **UrgoClean Ag** por **UrgoStart Contact** combinado con el vendaje multicomponente **UrgoK2**.
- Se mantiene esta pauta de curas hasta el cierre de la herida.

RESULTADO

- Tras 32 días de tratamiento, se logra la cicatrización completa de la herida. Se mantiene hidratación de la piel con **Corpitol** y compresión para evitar recidivas.

